

CLEANY TEETH for dogs

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WPROWADZENIE

Szczoteczka CleanyTeeth czyści zęby i dziąsła psa oraz chroni przed próchnicą i stanami zapalnymi dziąseł. Czyszczenie odbywa się za pomocą ultradźwięków i kompatybilnego żelu czyszczącego. Fale ultradźwiękowe wytwarzają delikatne wibracje powietrza. W każdej sekundzie milion drgań powietrza przepływa przez włosie i pianę (tworzoną przez żel do mycia zębów). Mogą one dotrzeć do każdego w jamie ustnej; oznacza to, że ultradźwięki przenikają przez tkankę dziąseł. Ultradźwięki docierają do najmniejszych przestrzeni, szczelin, pęknięć i czyszczą tam, gdzie konwencjonalne włosie szczoteczki do zębów nie może dotrzeć. Ultradźwięki czyszczą bez ruchu szczoteczki – dzięki temu są niezwykle delikatne i korzystne dla wrażliwych zębów i dziąseł. Szkliwo jest szczególnie chronione przed ścieraniem, a dziąsła przed podrażnieniami.

Uwaga: Ze względów higienicznych kilka zwierząt nie powinno używać tych samych końcówek. Nasadki ultradźwiękowe należy wymieniać co trzy miesiące, ponieważ po tym okresie ultradźwięki osłabiają włosie. Im słabsze włosie, tym niższa transmisja ultradźwięków. Prowadzi to do pogorszenia wyników czyszczenia zębów.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Proszę uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi oraz załączone ostrzeżenia.

Aby uniknąć porażenia prądem:

1. Zawsze umieszczaj stację ładującą w taki sposób, aby nie mogła wpaść do wanny, umywalki lub innego pojemnika z cieczą.
 2. Używaj stacji ładującej tylko na suchym, stabilnym podłożu, w suchym otoczeniu.
 3. Jeśli stacja ładująca wpadnie do wody, nie dotykaj jej. Natychmiast odłącz zasilanie.
 4. Nigdy nie używaj stacji ładującej w wannie.
- Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. Używaj urządzenia tylko do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej zwierząt i tylko w połączeniu z innymi urządzeniami i komponentami zalecanymi przez producenta. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem. Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby wtyczka była łatwo dostępna w dowolnym momencie.

NIEZAMIERZONE UŻYCIĘ

W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem użycia mogą wystąpić zagrożenia dla życia i ciała oraz szkody materialne. Z tego powodu użycie niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione. Aby uniknąć niezgodnego z przeznaczeniem użycia, wykonaj poniższe czynności.

- ▶ Urządzenie służy do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej. Może być obsługiwane wyłącznie przy napięciu zasilania określonym na tabliczce znamionowej (dolna strona stacji ładującej).
- ▶ Nie używaj łatwopalnych lub agresywnych chemikaliów, kwasów, zasad itp. do czyszczenia urządzenia.
- ▶ W przypadku wystąpienia szkód transportowych nie podłączaj stacji ładującej do źródła zasilania.
- ▶ Urządzenie można eksploatować tylko w pomieszczeniach w temperaturze pokojowej.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Akumulator szczoteczki CleanyTeeth został fabrycznie naładowany, dzięki czemu można jej używać od razu po wyjęciu z pudełka.

UŻYTKOWANIE

Zaleca się regularne stosowanie do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej zwierząt. Oznacza to 1–3 razy w tygodniu. Proces czyszczenia powinien trwać 3–5 minut. W przypadku krytycznych stanów zapalnych lub silnego tworzenia się kamienia nazębnego zaleca się dłuższy czas czyszczenia.

ZALETY UŻYTKOWANIA

- ▶ szybkie i wysoce skuteczne, antybakteryjne głębokie czyszczenie
- ▶ czyszczenie zębów i usuwanie kamienia nazębnego bez konieczności znieczulenia
- ▶ zapobiega powstawaniu nowej płytki nazębnej i kamienia nazębnego
- ▶ czyści bez ruchu, wibracji i hałasu (ważne dla wrażliwych zębów i dziąseł)
- ▶ czyści tam, gdzie włosie nie może dotrzeć (np. kieszonki dziąsłowe, przestrzenie międzyzębowe, głębokie szczeliny)
- ▶ poprawia krążenie krwi i przepływ limfy
- ▶ zmniejsza uszkodzenia zębów spowodowane ścieraniem i zmniejsza podrażnienia dziąseł spowodowane przez cząsteczki ściernie w paście do zębów nie zalecanych przez CleanyTeeth
- ▶ ultradźwięki wspomagają gojenie się ran i regenerację
- ▶ antybakteryjne działanie ultradźwięków eliminuje patogenne bakterie chorobotwórcze na zębach, dziąsłach, a zwłaszcza w kieszonkach dziąsłowych (gdzie namnażają się zarazki przyzębia)
- ▶ zmniejsza i zapobiega nieprzyjemnemu zapachowi z ust i próchnicy
- ▶ umożliwiła układowi odpornościowemu skupienie się na obszarach innych niż jama ustna
- ▶ higiena jamy ustnej jest wykonywana w domu, w znanym psu środowisku
- ▶ prawdziwa cotygodniowa profilaktyka, bez długich przerw, takich jak czyszczenie zębów zwierzęcia u weterynarza raz w roku.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SWOJE ZWIERZĘ Z URZĄDZENIEM

1. Umieść na palcu pastę o wielkości ziarnka grochu (ok 1 cm) i pozwól zwierzątkowi ją powąchać i polizać.
2. Włącz szczoteczkę i pozwól, aby Twój pupil się z nią oswoił.
3. Zbliź urządzenia do szyi, a następnie warg zwierzęcia.
4. Ostrożnie podnieś wargi i włóż szczoteczkę.
5. Kiedy zwierzę będzie oswojone, zacznij proces czyszczenia zębów. Luźno rozprowadź pastę do zębów za pomocą włosia na wewnętrznej i zewnętrznej stronie zębów. Rozpocznij od tylnych zębów trzonowych, trzymając szczecinę nasadki bez ruchu i bez nacisku na zęby. Włosie pokrywa od 1 do 3 zębów jednocześnie (zależnie od wielkości zwierzęcia). Przytrzymaj nasadkę przez 10 sekund przy zębach, a następnie przejdź do następnych zębów. Nie należy szczotkować zębów!!!
6. Po wyczyszczeniu wszystkich zębów (urządzenie pozostawiając włączone), należy główkę szczoteczki przepłukać wodą. Następnie wyłącz szczoteczkę. Ultradźwięki sterylizują, więc włosie jest dokładnie dezynfekowane podczas płukania. Aby naładować urządzenie, umieść je w ładowarce.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Urządzenie może pracować w dwóch trybach:

- ▶ Naciśnij włącznik/wyłącznik jeden raz, aby włączyć urządzenie w trybie wibracji.
- ▶ Naciśnij przycisk włącznik/wyłącznik dwa razy w krótkim odstępie czasu, aby aktywować tryb cichej pracy bez wibracji. Zapali się niebieska dioda LED; oznacza to, że urządzenie jest włączone i działa prawidłowo (generowane są ultradźwięki). Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyłącza się po trzech minutach. Można je włączyć ponownie na kolejne trzy minuty.

ŁADOWANIE

Aby naładować urządzenie CleanyTeeth, podłącz je za pomocą przewodu ładującego do dowolnej ładowarki USB. Można użyć ładowarki smartfona (np. iPhone'a, iPada lub Android) lub wyjścia USB laptopa.

Podczas ładowania dioda LED migocze i gaśnie. Jak tylko bateria zostanie w pełni naładowana, zielona dioda LED zaświeci się na stałe, dopóki wtyczka micro-USB ładowarki jest podłączona do gniazda ładowania szczoteczki do zębów.

CZYSZCZENIE ZĘBÓW

▶ Dezynfekcja i nawilżanie główki i szyjki szczoteczki
Aby zdezynfekować szczoteczkę, włącz urządzenie i płukać pod wolno wodą przez około 3 sekundy. Ultradźwięki mają działanie dezynfekujące.

▶ Nałożenie żelu/pasty

Nałóż około jednego centymetra żelu/pasty do szczoteczek ultradźwiękowych na główkę szczoteczki. Specjalny żel do ultradźwięków wspomaga działanie ultradźwięków, tworząc miliardy maleńkich pęcherzyków, które niszczą i usuwają bakterie wraz z innymi osadami.

▶ Rozprowadzenie żelu/pasty na zębach

Rozprowadzić żel na powierzchni zębów (przednią, tylną i powierzchnię żującą) przed rozpoczęciem właściwego czyszczenia.

▶ Czyszczenie zębów

Przy włączonym urządzeniu umieścić główkę szczoteczki na każdej powierzchni zęba na 2–3 sekundy, aby je wyczyścić (przód i powierzchnię żującą), a następnie przejść do następnego zęba. Nie wywierać nacisku na zęby główką szczoteczki. Należy zwilżyć główkę szczoteczki lub pysk psa, ponieważ woda wspomaga transmisję ultradźwięków. Powtarzaj kroki, aż wszystkie zęby zostaną wszystkie zęby. Jeśli chcesz szczotkować, to nie ma problemu. Z pojedynczą szczoteczką będziesz w stanie skończyć w około 60 sekund, a z trójstronną główką szczoteczki w około 30 sekund. Pianka pomiędzy włosiem jest idealna dla transmisji ultradźwięków, a tym samym dla wyników czyszczenia.

▶ Czyszczenie języka

Wystarczy umieścić główkę szczoteczki na środku języka na 3 sekundy.

▶ Po czyszczeniu

Po czyszczeniu podaj psu trochę wody do picia.

▶ Dezynfekcja i wyłączenie urządzenia

Aby zdezynfekować szczoteczkę, trzymać główkę szczoteczki pod wodą przez 3 sekundy przy włączonym urządzeniu. Następnie wyłączyć urządzenie.

OSTRE STANY ZAPALNE I ZAPALENIE PRZYŻĘBIA

Jeśli twoje zwierzę ma wrażliwe zęby, delikatnie trzymaj włosie przy zębach, a następnie dziąsłach. Jeśli to możliwe, pozostaw przez 30–60 sekund, aby osiągnąć szybkie i skuteczne czyszczenie. Wydłużony czas użytkowania jest nieszkodliwy, ponieważ technologia ultrasoniczna jest nieszkodliwa.

ULTRASONICZNA PASTA DO ZĘBÓW DLA ZWIERZĄT

Ultrasoniczna pasta do zębów opracowana specjalnie na potrzeby zwierząt.

KONSERWACJA I UTYLIZACJA BATERII

Baterie znajdują się w wodoszczelnej rękojeści urządzenia. Bardzo ważne jest, aby baterie nigdy nie były całkowicie rozładowane. To urządzenie zawiera specjalne, przyjazne dla środowiska akumulatory. Niemniej jednak nie wolno ich wyrzucać razem ze zwykłymi śmieciami domowymi. Do usuwania należy użyć pojemników zbierających lub podobnych. Utylizacja jest również możliwa w prawie wszystkich sklepach sprzedających baterie.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

▶ Czym są ultradźwięki?

Są to delikatne wibracje/oscylacje, niesłyszalne, niewidoczne i nieodczuwalne. Urządzenie może pracować w dwóch trybach: z wibracją lub bez.

▶ Jak często powinienem czyścić zęby mojego psa?

Jeśli zęby są wolne od kamienia nazębnego i dziąseł oraz nie są zaczerwienione/opuchnięte, należy czyścić je mniej więcej raz lub dwa razy w tygodniu. W przypadku kamienia nazębnego/opuchniętych dziąseł tak często, jak to możliwe bez stresu. Nie ma żadnych szkodliwych skutków ubocznych!

▶ Czy ultradźwięki mają szkodliwe działanie?

Ultradźwięki generowane przez urządzenie nie są porównywalne z „twardymi” ultradźwiękami stosowanymi przez dentystów i weterynarzy. Wersje tej technologii są stosowane u ludzi od ponad 20 lat.

▶ Czy można używać urządzenia u kotów?

Główce szczoteczki są zbyt duże dla kota.

▶ Jakie są zalety pasty do zębów dla psów CleanyTeeth

W niektórych/większości past do zębów najbardziej aktywnym składnikiem są cząsteczki ściernie. Nasza pasta do zębów nie zawiera żadnych cząstek ściernych. W przypadku typowej szczoteczki do zębów, niezależnie od tego, czy jest to elektryczna szczoteczka soniczna, czy szczoteczka manualna, wyniki uzyskuje się poprzez szorowanie / szorowanie zębów i dziąseł, dlatego niezbędne są cząsteczki ściernie. Z drugiej strony, w przypadku CleanyTeeth dla psów generowane są fale ultradźwiękowe/oscylacje, które zdmuchują/niszczą zarazki i bakterie, a także małe cząsteczki jedzenia. Nasza pasta do zębów generuje nanopęcherzyki, które pomagają w niszczeniu zarazków i bakterii. Ponadto fale ultradźwiękowe przenikają przez niektóre warstwy dziąseł, niszcząc zarazki i bakterie. Podobne formy technologii są stosowane u ludzi od ponad 20 lat. Udowodniono, że jest ona bezpieczna i skuteczna.

▶ Po ilu użyciach pojedynczej i trójstronnej główki szczoteczki należy ją wymienić?

Główkę szczoteczki należy wymienić, gdy włosie zacznie się strzępić i wyginać. Jednak nie zaleca się stosować dłużej niż trzy miesiące

▶ Jaka jest szacowana żywotność produktu?

Szacowana żywotność akumulatora produktu wynosi około 5 lat.

Groomer 
Shop.pl

Serwis

Podmiot odpowiedzialny

Pianowo 38, 64-000 Kościan

tel. (61) 666 12 20